

BIPAP VISION




FILTRO



PIEZAS DE LA BIPAP



CONEXIÓN EN (T) SE QUITA

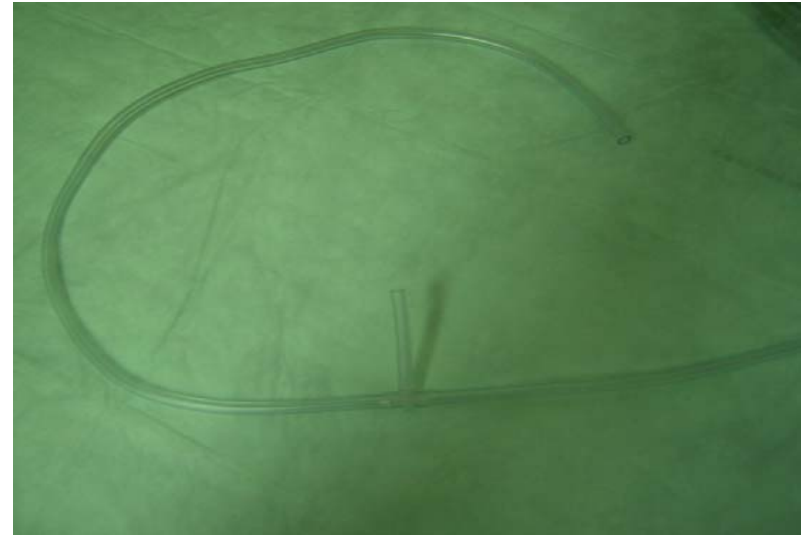

TUBULADURA SIN LA CONEXIÓN EN (T)



APÓSITO PARA LA NARIZ




- **Visión montada**
- **Enchufar corriente eléctrica**
- **Conectar alargadera de oxigeno**
- **Encender**





- La visión hace el autotest
- Pulsar el botón del orificio espiratorio

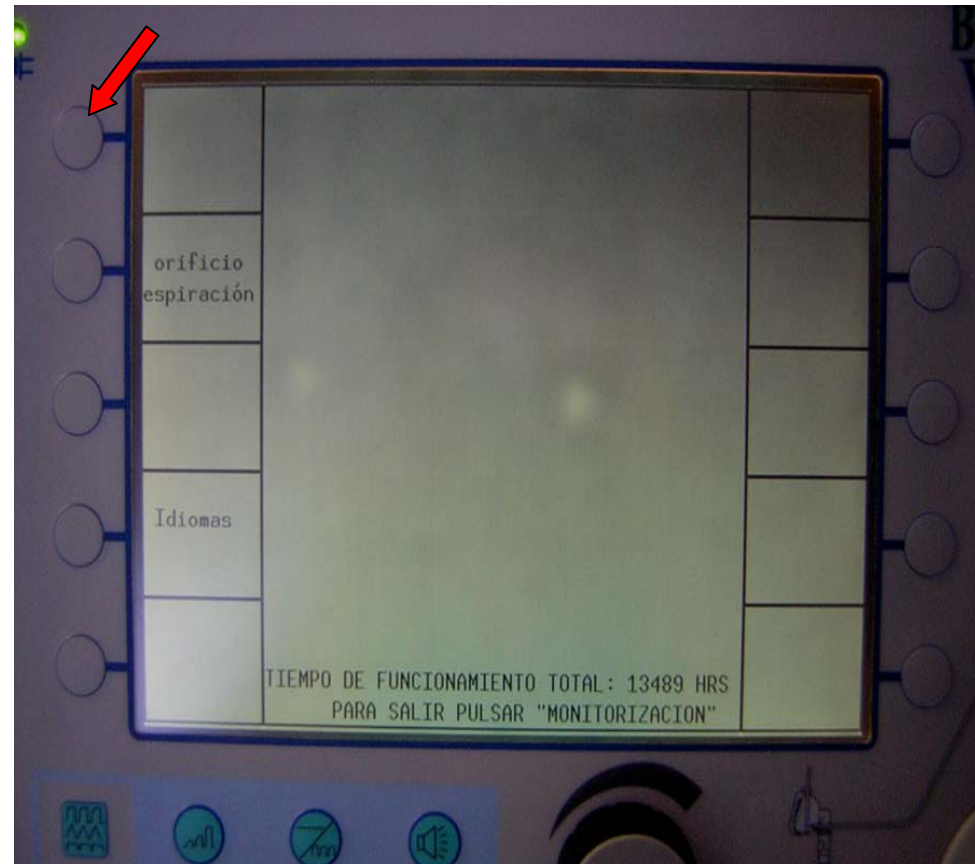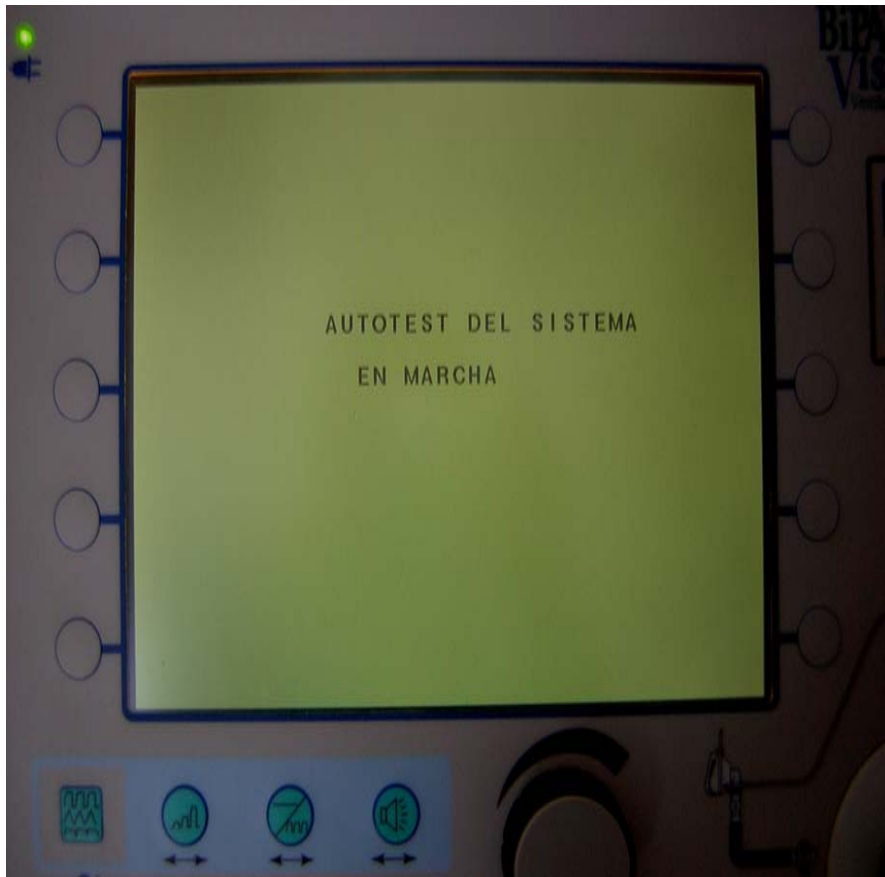

- Pulsar inicio test
- Tapar orificio espiratorio

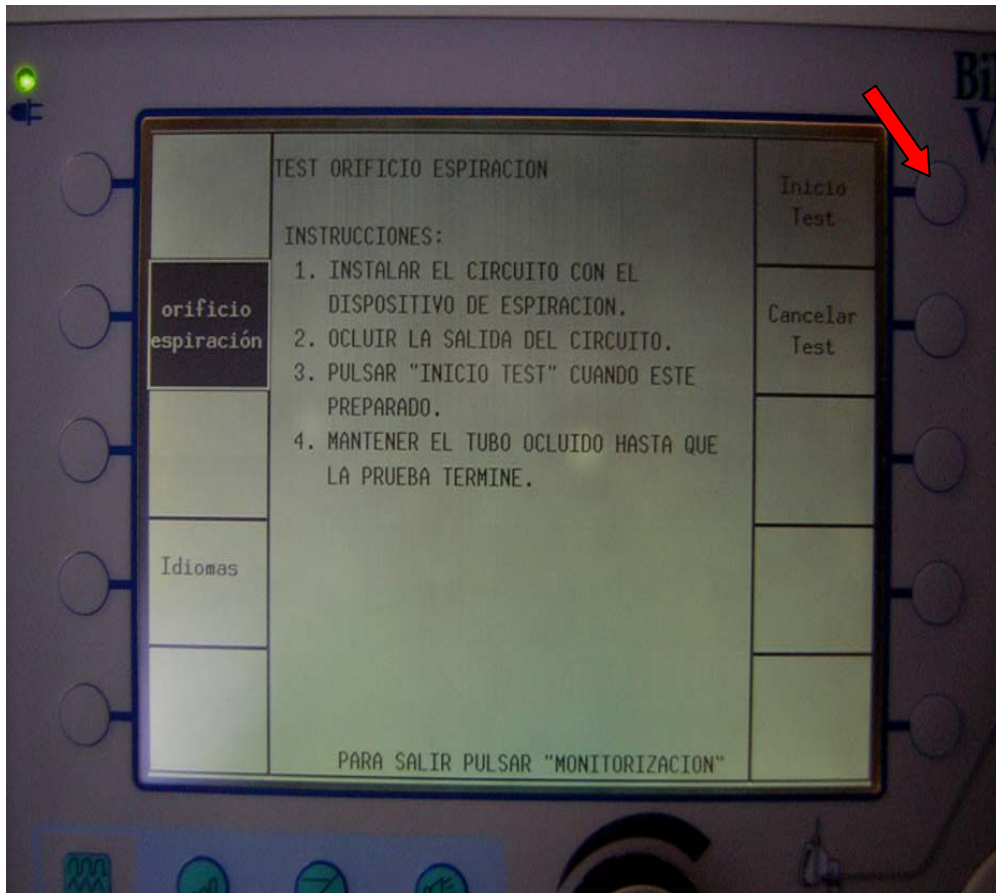

- El test se pone en marcha
- Test finalizado
- Para salir pulsar en monitorización

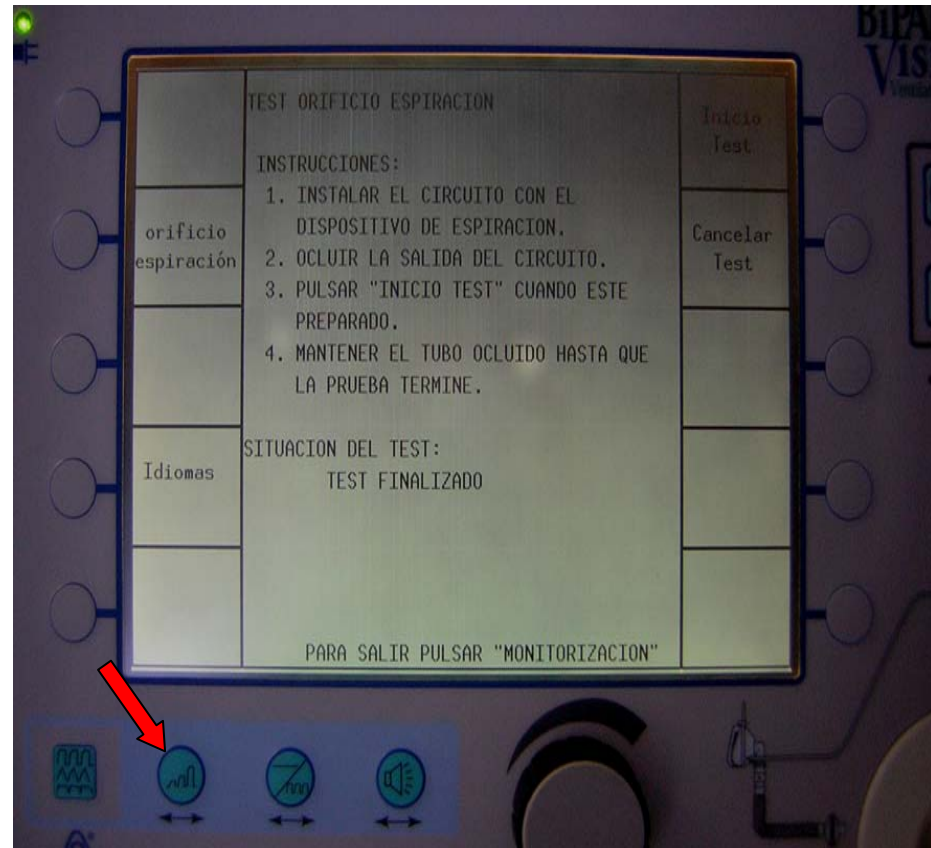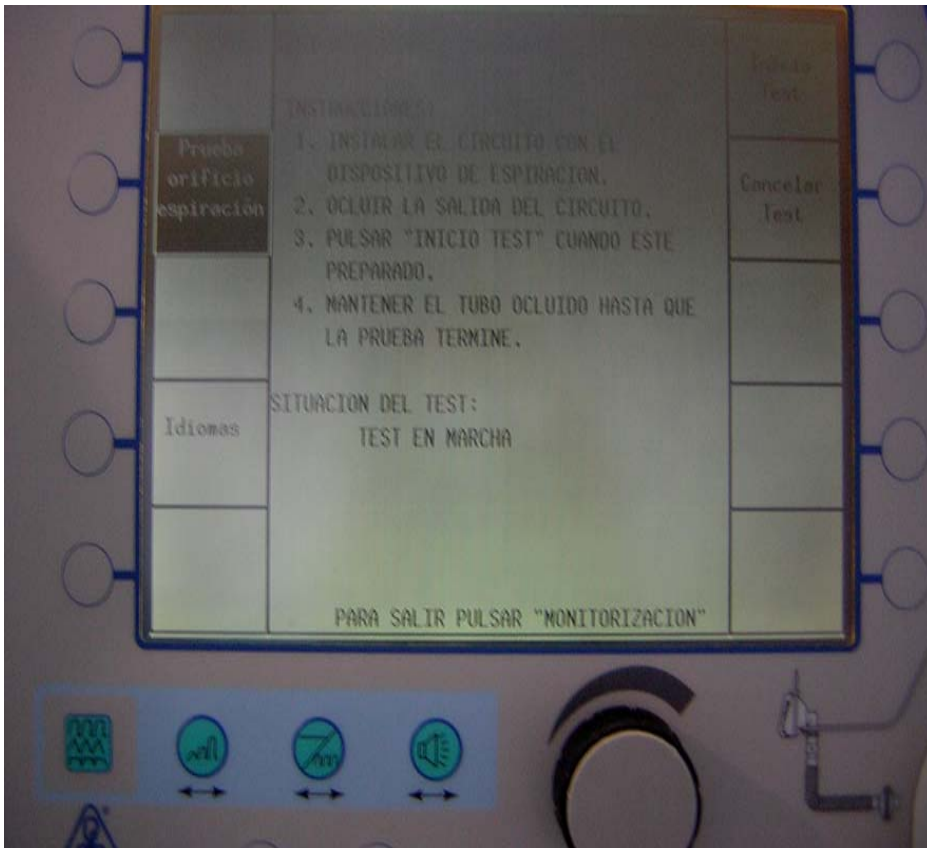

BIPAP ST



FILTRO





PIEZAS DE LA BIPAP ST



TUBULADURA CON LA CONEXIÓN EN (T)



- Poner la conexión en (T), parte de delante
- La conexión en (T) más larga, se conecta en la parte de atrás

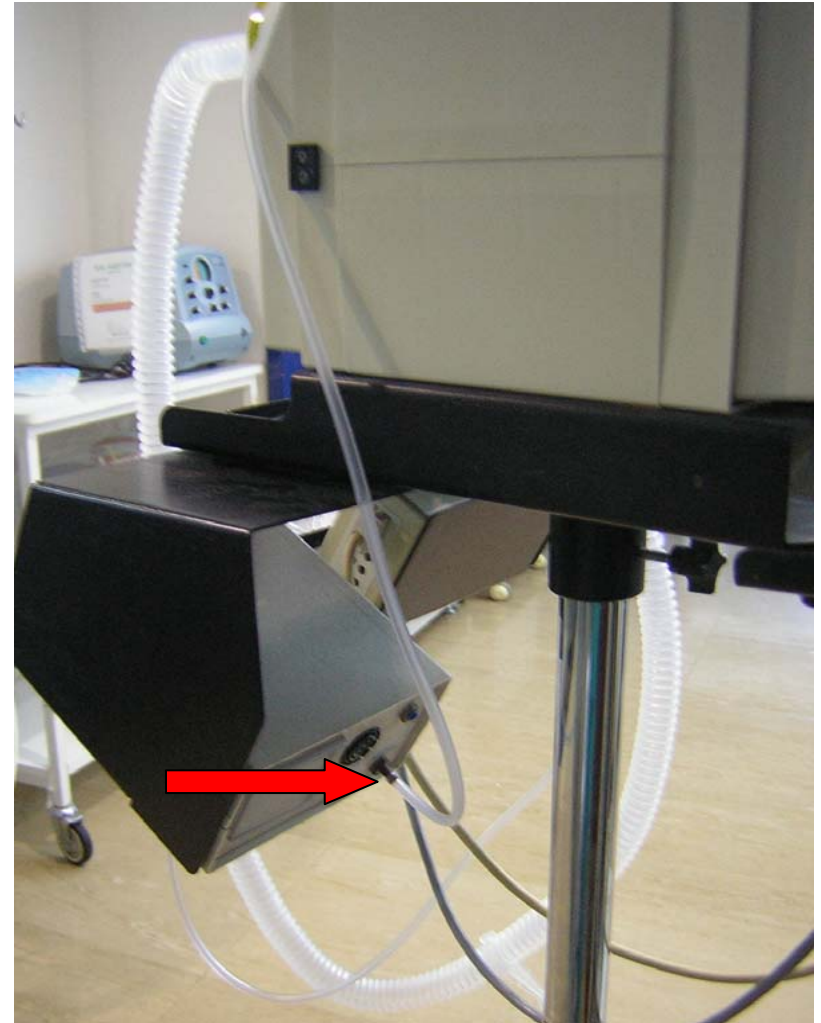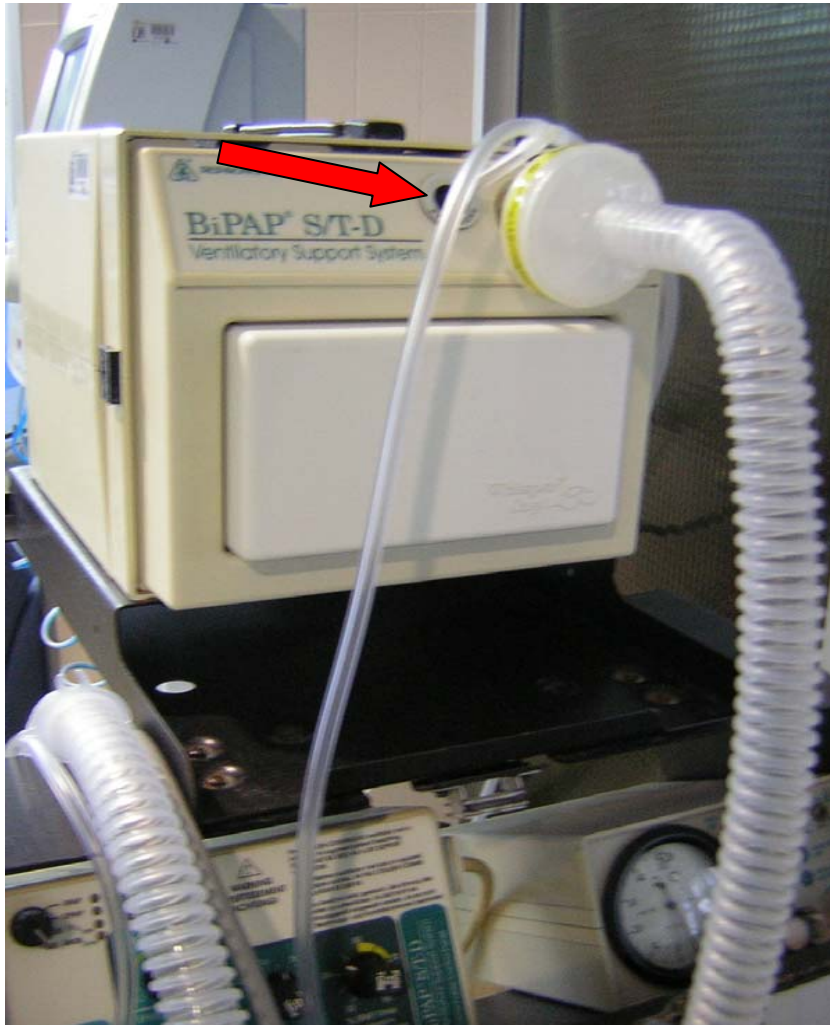

- Encender
- IPAP, EPAP, y volumen Taidal, lo programan los facultativos
- Est. Leak → son las fugas

